

NDP SurfaPlus

Desinfectante con alcohol
para toda clase de
superficies

- Bactericida, fungicida y virucida.
- Secado rápido y acabado brillante.
- Solución lista para usar.

**Eficacia contra
virus según
norma EN14476**



NDP SurfaPlus

Aplicaciones

Desinfección de equipos y superficies clínicas: camillas, mesas de operaciones, camas de hospitalización, pantallas, goteros, sillas de ruedas, carros de curas, interior de ambulancias, equipos de diálisis, etc.

Eficacia

- **Bacterias:** EN1276, EN13697, EN13727.
- **Hongos:** EN13697, EN1650, EN13624.
- **Virus:** EN14476, EN14348.

Presentaciones

- Envase de **750ml** en spray.



CE
0476

Clase IIa.

Modo de uso



1. Limpieza de la zona a desinfectar

En caso de suciedad visible y para mejorar los resultados de la desinfección, se recomienda limpiar la zona previamente.

La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba hacia abajo y de dentro hacia fuera.

2. Desinfección por pulverización

Pulverizar NDP SurfaPlus hasta total impregnación. Dejar actuar hasta que se evapore.

No requiere aclarado.



Desinfectante con alcohol para toda clase de superficies hospitalarias. Solución lista para usar.

Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos (incluyendo *Aspergillus*) y virus.

Es compatible con todo tipo de materiales.

Eficacia antibacteriana según Normas Europeas en sólo 1 minuto

Su formulación con alto contenido en alcohol (30%), asegura un **secado rápido** y un **acabado brillante**.